

## **Инструкция по эксплуатации поручня.**

### **Назначение:**

Поручень для ванной комнаты сделан из хромированной стали, предназначен для облегчения входа в ванну и выхода из неё, для обеспечения дополнительной опоры во время использования душевой кабины.

### **Установка:**

1. Определите наиболее удобное место для установки поручня, учитывая рост и особенности пользователя.
2. Убедитесь, что стена, на которую будет крепиться поручень, достаточно прочная.
3. Обратите внимание из какого материала сделана стена ( бетон, древесина, кирпич, газобетон и т.д ). Предлагаемый в комплекте монтажный комплект (дюбель и шуруп) рассчитан на крепление к бетонной стене и древесине. Для других материалов стен монтажный комплект должен быть подобран индивидуально.

### **Использование:**

1. Используйте поручень для опоры и поддержания равновесия. Крепление поручня рассчитано на усилие до 50 кг.
2. Держитесь за поручень всей рукой, а не только пальцами.

### **Уход:**

1. Регулярно очищайте поручень от загрязнений мягким моющим средством.
2. Не используйте абразивные чистящие средства.
3. Не допускайте контакта поручня с агрессивными химическими веществами.